



COMO FAZER BACKUP E RESTAURAR EXAMES


Execute o programa Gerente Xp, indicado abaixo

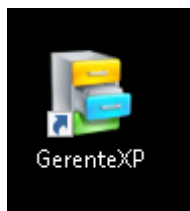


Clique no botão “Nova Gerência de exames” indicado abaixo

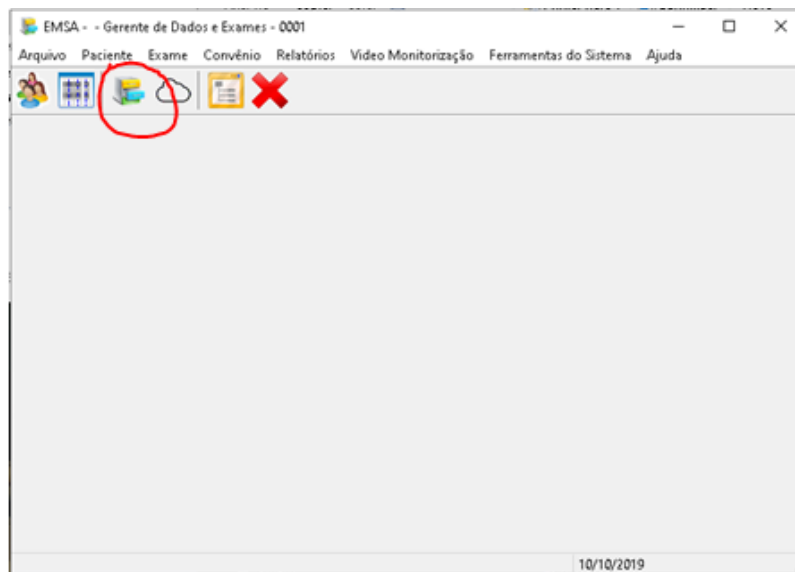

Para BackUp, selecione quantos exames quiser gravar e clique no botão BackUp indicado abaixo pela seta vermelha.

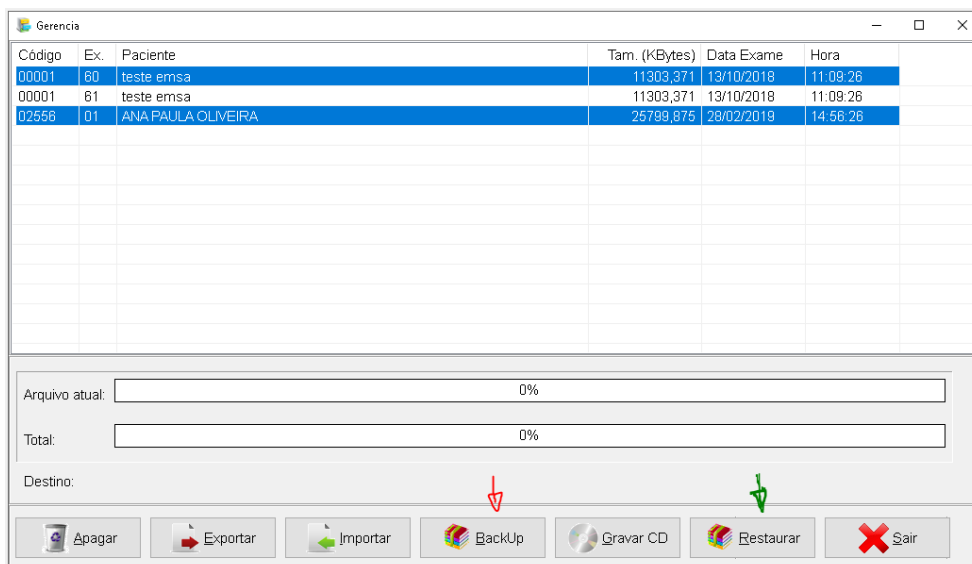


Na tela seguinte, apresentada abaixo, indique o destino aonde será armazenado o BkUp

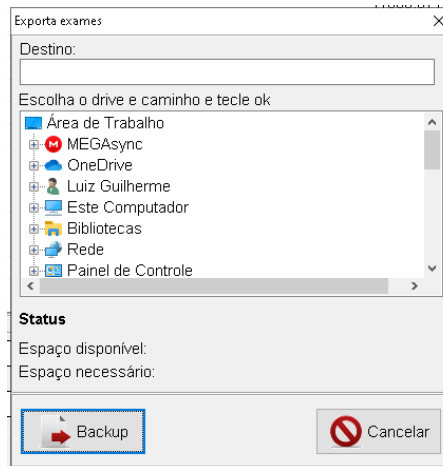

Todas as configurações de montagens, estados de ativação do paciente e outras personalizações do computador que originou o exame serão armazenados juntamente com os exames no BkUp.

Para Restaurar, selecione quantos exames quiser e clique no botão Restaurar, indicado abaixo pela seta verde

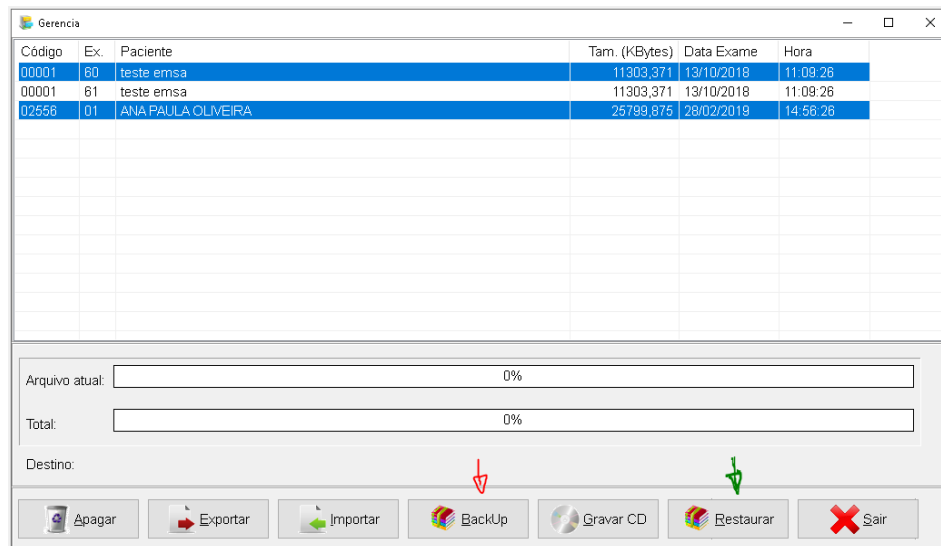

Na tela seguinte, apresentada abaixo, indique o destino aonde será armazenado o BackUp.

Atenção: Se a opção “Copiar arquivos de configuração” for selecionada na restauração, todas as configurações do sistema de EEG destino serão substituídas pelas configurações do sistema de origem do exame.

