


Analise de Exame com Vídeo no EEG telas

- Abra o programa de análise e escolha o exame que foi realizado com vídeo.
- Em seguida, clique no botão com o ícone M (Vídeo Monitorização) ou vá no Menu em **MODO > Vídeo Monitorização**.

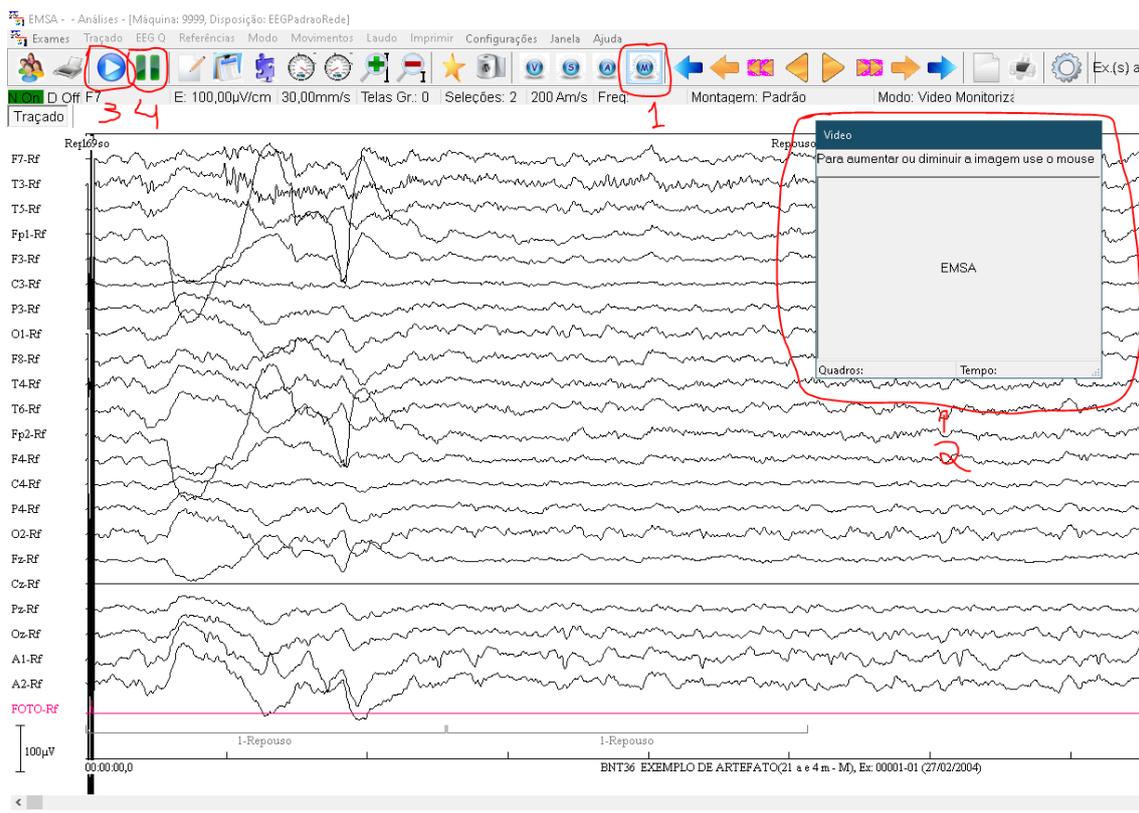

- Ira abrir uma janela no canto superior direito da tela, onde irá exibir o vídeo do paciente fig (2)
- Para correr o exame (traçado junto com o vídeo, clicar no botão do **PLAY** fig (3) e o Pause do vídeo no Botão **PAUSE** fig(4).
- Caso não queira usar o recurso do PLAY, poderá usar as teclado teclas **Page down e Page Up** ou o **scroll do MOUSE**, para movimentar o traçado, pois o vídeo também ira ir passando automaticamente.....acompanhando o movimento do traçado.
- Com relação a separar as telas para impressão, é a mesma forma que faria se fosse somente traçado, basta ir apertando **INSERT** em cada tela que gostaria de salvar, pois ira salvar o traçado e a imagem exibida no vídeo.