

## Criando disposições NOVAS no programa

Abra o captções, vai na opção TESTE, em seguida, no menu superior, vai em CONFIGURAÇÕES > DISPOSIÇÃO. Na mensagem que exibir, clicar em NÃO.

Irá abrir essa tela.

Cria ou altera nova disposição

Nome da disposição: DigiteAquiONome

Disposição

Canal

|           |           |
|-----------|-----------|
| Anotacao  | Oculo     |
| AirFlow   | OximetroA |
| AirFP     | Oximetro  |
| AirCPAP   | Pera      |
| AFPDC     | Posi      |
| Cinta     | PosiDC    |
| CintaA    | PosDig    |
| CPAP      | Ronco     |
| CPAPN     | Temp      |
| Capno     | Vazamento |
| Dessat    | Volume    |
| EEG       | 300P      |
| EKG       | PeraAC    |
| EMGQueixo |           |
| EMGTibia  |           |
| Foto      |           |
| FreqCard  |           |
| Move      |           |

Número do canal: 1

Nome do canal:

Freq de Amostragem: 200

Cn 01= Oc2  
Cn 02= C4  
Cn 03= O2  
Cn 04= Oc1  
Cn 05= C3  
Cn 06= O1  
Cn 07= A2  
Cn 08= A1  
Cn 09= Queixo  
Cn 10= Cardio  
Cn 11= Tibia\_E  
Cn 12= Tibia\_D  
Cn 13= AirFP  
Cn 14= Cinta\_T  
Cn 15= Cinta\_A  
Cn 16= Ronco  
Cn 17= Bipolar  
Cn 18= Bipolar  
Cn 19= Bipolar  
Cn 20= DC  
Cn 21= DC  
Cn 22= DC  
Cn 23= DC  
Cn 24= DC  
Cn 25= DC  
Cn 26= DC  
Cn 27= DC  
Cn 28= DC  
Cn 29= DC

Salvar

Sair

Nessa tela, você poderá carregar uma disposição já existente e somente edita-la ou criar uma do ZERO.

Para editar uma já existente, basta clicar no ícone  e escolher a disposição desejada. Irá carregar os canais ativos da disposição no canto da esquerda da janela conforme imagem a baixo:

Cria ou altera nova disposição

X

Nome da disposição: BNTEEGPadraoRede





Disposição

☐ C001=F7;EEG;164;2;1;1  
☐ C002=T3;EEG;174;2;1;1  
☐ C003=T5;EEG;168;2;1;1  
☐ C004=Fp1;EEG;156;2;1;1  
☐ C005=F3;EEG;163;2;1;1  
☐ C006=C3;EEG;167;2;1;1  
☐ C007=P3;EEG;173;2;1;1  
☐ C008=O1;EEG;173;2;1;1  
☐ C009=F8;EEG;169;2;1;1  
☐ C010=T4;EEG;172;2;1;1  
☐ C011=T6;EEG;157;2;1;1  
☐ C012=Fp2;EEG;166;2;1;1  
☐ C013=F4;EEG;164;2;1;1  
☐ C014=C4;EEG;165;2;1;1  
☐ C015=P4;EEG;157;2;1;1  
☐ C016=O2;EEG;162;2;1;1  
☐ C017=Fz;EEG;165;2;1;1  
☐ C018=Cz;EEG;166;2;1;1  
☐ C019=Pz;EEG;169;2;1;1  
☐ C020=Oz;EEG;158;2;1;1  
☐ C037=FOTO;Foto;2000;0;3;1






Canal

|           |           |
|-----------|-----------|
| Anotacao  | Oculo     |
| AirFlow   | OximetroA |
| AirFP     | Oximetro  |
| AirCPAP   | Pera      |
| AFPDC     | Posi      |
| Cinta     | PosiDC    |
| CintaA    | PosDig    |
| CPAP      | Ronco     |
| CPAPN     | Temp      |
| Capno     | Vazamento |
| Dessat    | Volume    |
| EEG       | 300P      |
| EKG       | PeraAC    |
| EMGQueixo |           |
| EMGTibia  |           |
| Foto      |           |
| FreqCard  |           |
| Move      |           |

Número do canal:

1

Nome do canal:

Freq de Amostragem:

200

Cn 01= Oc2

Cn 02= C4

Cn 03= O2

Cn 04= Oc1

Cn 05= C3

Cn 06= O1

Cn 07= A2

Cn 08= A1

Cn 09= Queixo

Cn 10= Cardio

Cn 11= Tibia\_E

Cn 12= Tibia\_D

Cn 13= AirFP

Cn 14= Cinta\_T

Cn 15= Cinta\_A

Cn 16= Ronco

Cn 17= Bipolar

Cn 18= Bipolar

Cn 19= Bipolar

Cn 20= DC

Cn 21= DC

Cn 22= DC

Cn 23= DC

Cn 24= DC

Cn 25= DC

Cn 26= DC


Cn 27= DC

Cn 28= DC

Cn 29= DC

 Salvar

 Sair

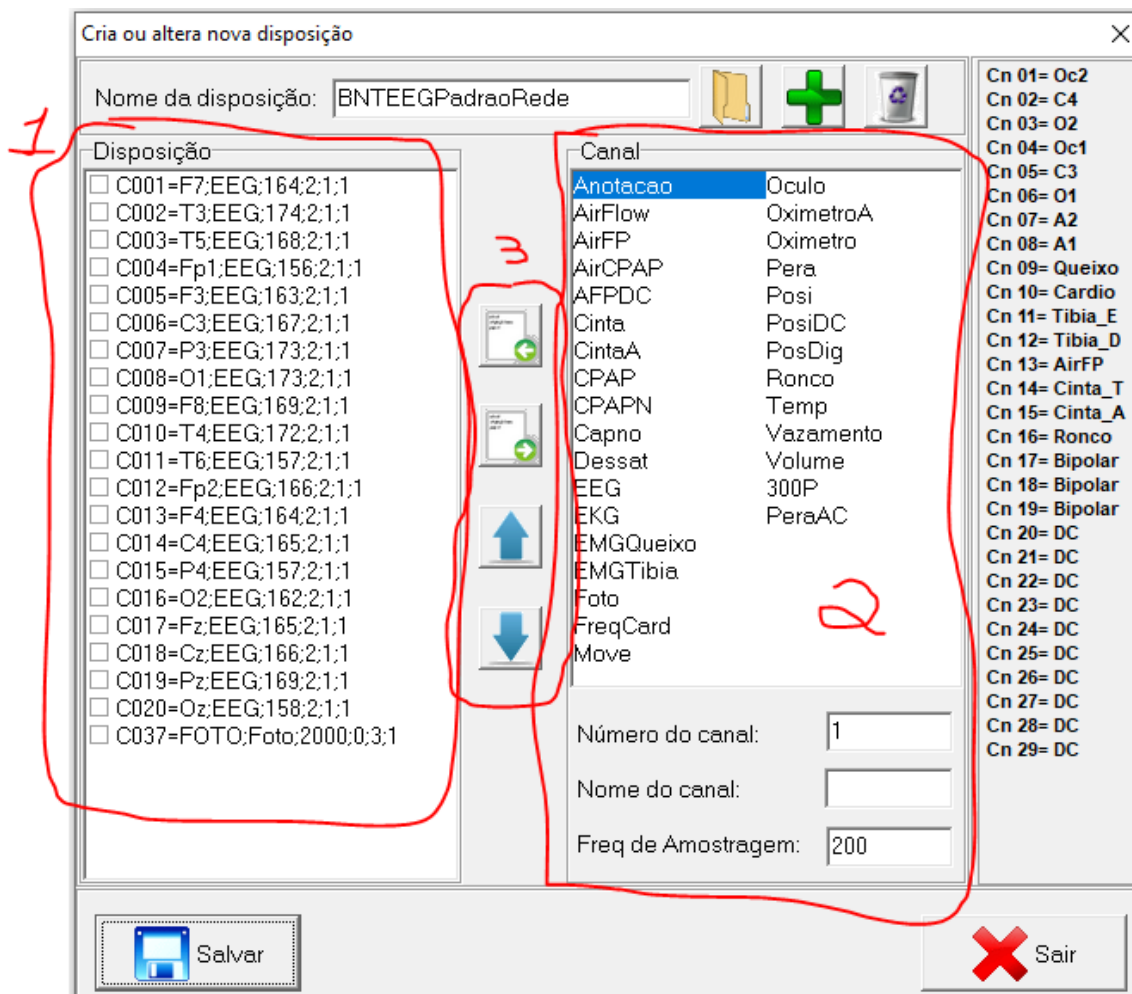

1 – Local onde são exibidos os canais ativos da disposição.

2 – Opção do tipo de canais a ser configurado.

3 – Acrescenta canal da disposição . Retira canal na disposição . Coloca o canal

selecionado para cima ou para baixo  , organizando conforme deseja que seja exibido no programa.