


Fazendo backup de exame com vídeo pelo gerente de dados.

1 - Abra o programa GERENTE DE DADOS ou GERENTEXP




2- Ao abrir, clique no menu superior em VIDEO MONITORIZAÇÃO e na aba que abrir, clique em BACKUP. Irá abrir a janela seguinte. Nessa janela, irá selecionar o paciente que quer fazer o backup com vídeo e clicar em OK.

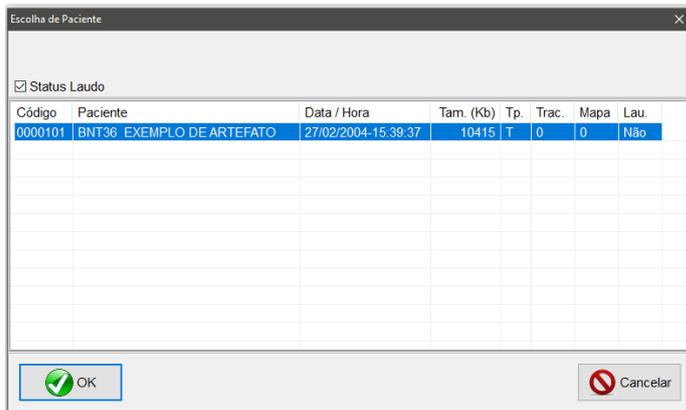


Na janela seguinte, irá escolher o local que deseja salvar o BACKUP, para isso, selecione uma pasta ou local desejado na área que está apontada como 1.

Após selecionar o local, marque a opção Todos os BUFFERS, conforme marcação 2 e em seguida clique em OK. Irá fazer o backup do exame e ao final, irá exibir na porcentagem 99%, assim que terminar, basta clicar em sair

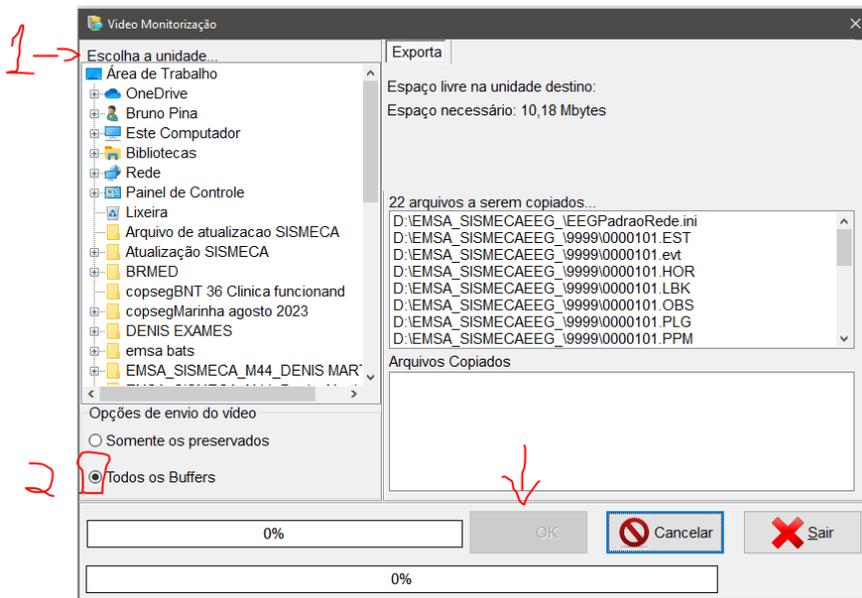

Ao final do processo, o exame que foi realizado o backup está dentro do local que escolheu, o exame fica sem está compactado, conforme imagem a seguir:

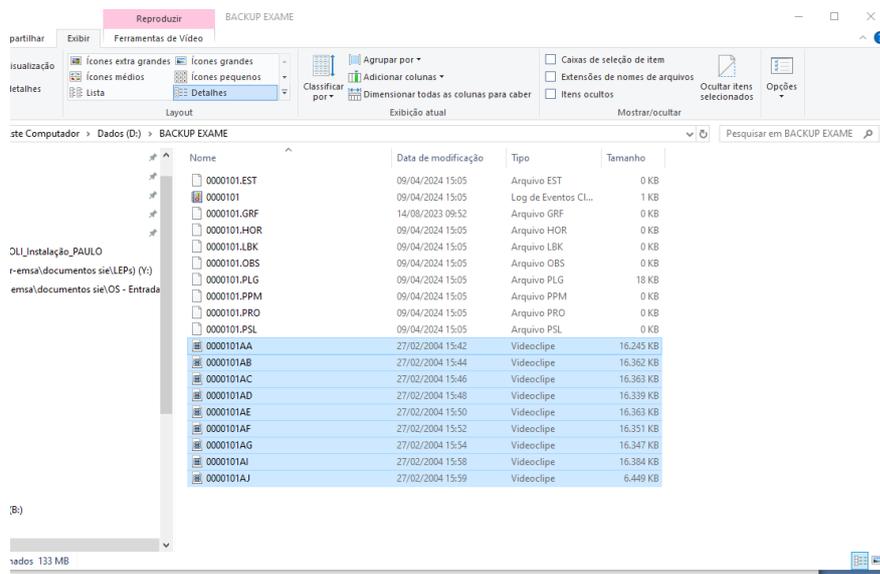

Basta pegar esses arquivos e compactar para ficar mais organizado, dando o nome do paciente.