

AJUSTE DE CANAIS AC - CALIBRAÇÃO


Retire todos os eletrodos do painel de eletrodos.

Identifique o modelo de seu equipamento.

Sendo equipamento modelo BNTEEG, BNTPoli, BNTPlusEEG ou BNTPlusPoli, conecte o **Cartucho de Calibração** no conector correspondente no equipamento.

Certifique-se de que o equipamento esteja ligado.

Execute o programa de **Captção** no botão Testes...

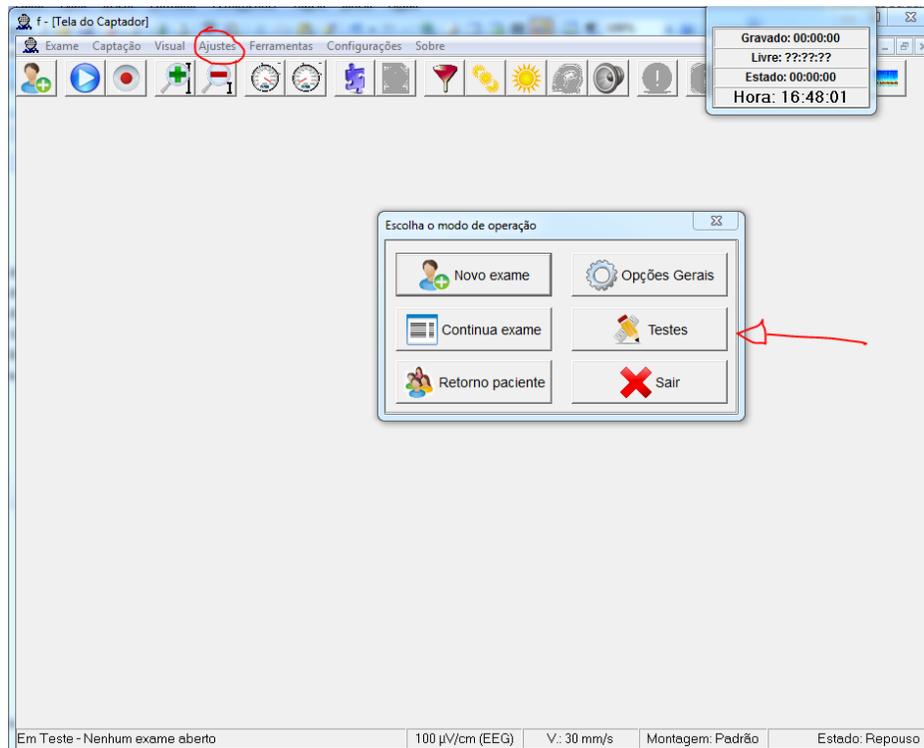

Clicar no menu **Ajustes**, opção **Canais AC (Equipamento)**

O sinal de calibração vai correr na tela.

Aguarde entre 30 segundos a um minuto, enquanto algumas telas são preenchidas com o sinal de calibração

No lado direito, haverá uma coluna com números. Todos estes números devem estar **na cor verde**.

Se todos os valores estiverem **na cor verde**, tecla a tecla **esc** em seu teclado e encerre clicando em ok, salvando os valores de calibração.

Saia do programa de captação e retire o cartucho de calibração. O ajuste de canais AC foi efetuado com sucesso.

Se algum dos valores estiver em vermelho, retire e conecte novamente o cartucho de calibração, aguarde entre 30 segundos a um minuto e verifique se os valores estarão em verde. Caso algum valor se mantenha em vermelho, entre em contato com nosso suporte técnico.