


CONFIGURAR SEQUÊNCIA DE FOTOESTIMULAÇÃO

Na tela de captações, clicar no menu de *configurações*, opção *Sequência de foto estimulação*(sequência de trigger out)

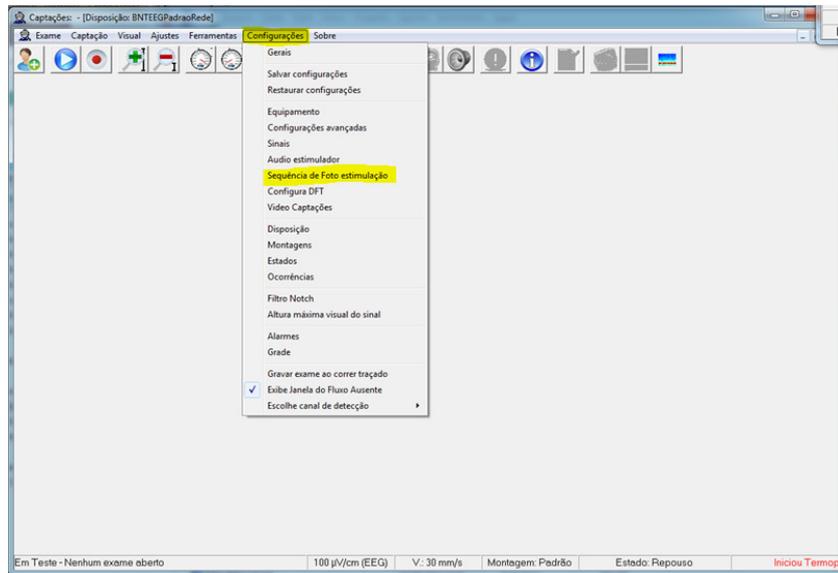

Na tela de configuração de sequência de trigger out abaixo, é possível configurar duas sequências diferentes. O padrão é a sequência 1.

A lista Tempo; Frequência apresenta a sequência de foto estimulação configurada.

Para modificar esta sequência, escolha o tempo (duração) de cada frequência de estimulação desejada e clique no botão para inserir na lista.

Se necessário remover alguma etapa da sequência, selecione e clique no botão para remover da lista.

Quando a lista estiver conforme desejado, clique em SALVAR

