


COMO SALVAR E RESTAURAR CONFIGURAÇÕES

A configuração mantém informações sobre montagens, configuração de estados de ativação do paciente, cabeçalhos de laudos e outras personalizações do programa. Portanto, ao salvar as configurações o usuário cria um backup das personalizações do sistema, que pode ser restauradas caso necessário.


1. Execute o programa de Captações de Exames



Para salvar as configurações, clique no menu “Configurações”, opção salvar configuração (1).

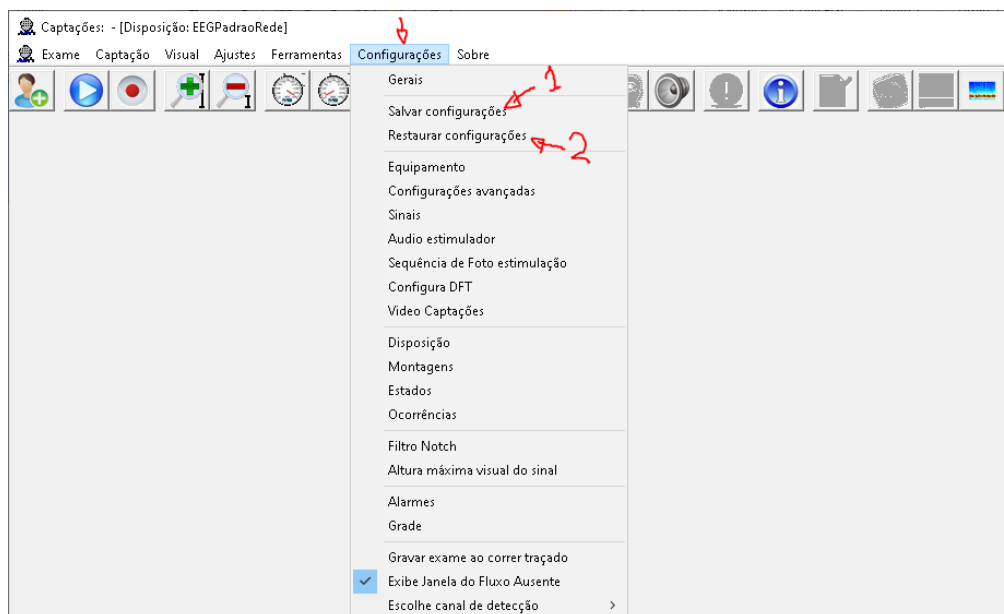

Atribua um nome para a configuração salva. Recomendamos o uso de data, por exemplo EEG_10_11_2019

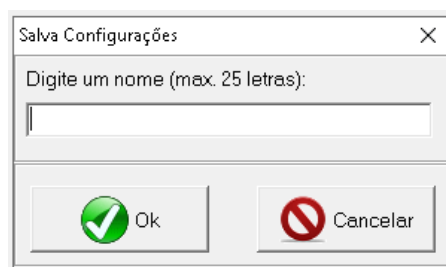

Para restaurar uma configuração salva, clique em Restaura Configurações (2) e na tela escolha o backup de configuração que deseja restaurar

