



Para configurar parâmetros de **filtro e amostragem** do equipamento

No programa de captação, clicar na opção **TESTE**

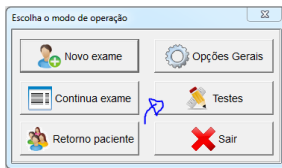

Em seguida clicar no menu **Configurações**, opção **Equipamento**

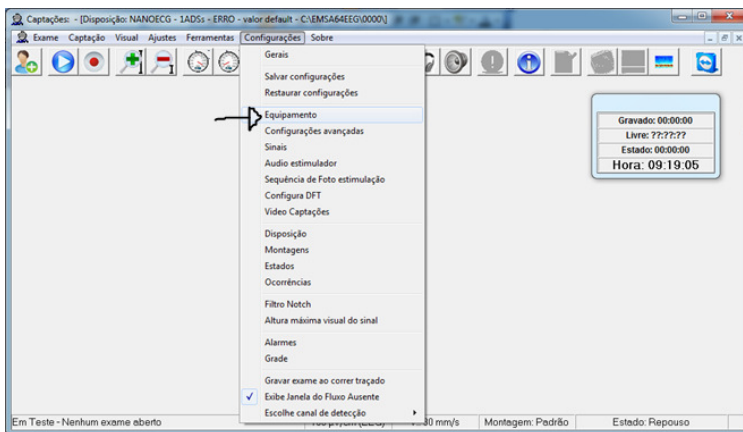

Na tela de configurações abaixo, clique no tipo de canal que deseja configurar, por exemplo, **EEG**.

Digite os parâmetros de filtro e amostragem conforme desejado. Por exemplo, passa altas 1, Freq. amostragem Hz: 200.

Clique no botão de atualização, que representa duas setas opostas verdes, assinalado na imagem abaixo.

Verifique se os valores desejados estão carregados corretamente nos respectivos campos.

