


Instruções para Mapeamento Cerebral


Para gerar o mapeamento Cerebral, abra o EEG telas XP




Com o Telas aberto, no MENU SUPERIOR, clique em MODO em seguida em SELECIONA. Conforme a imagem abaixo:

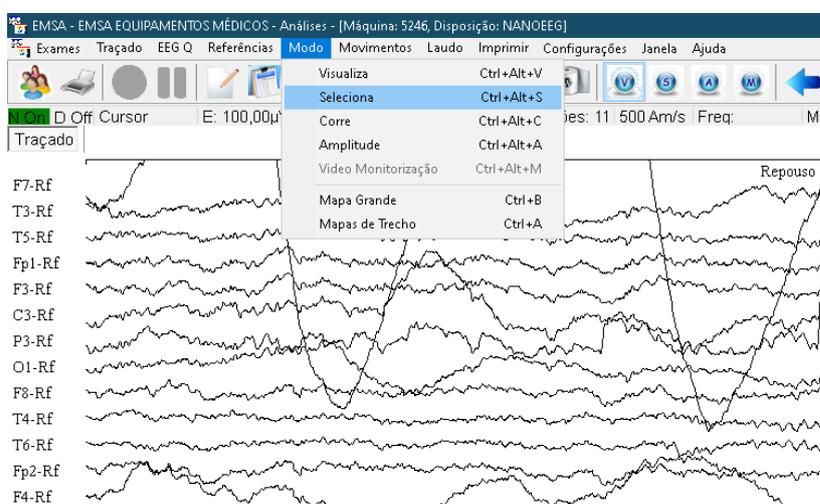

Ira exibir no traçado um retângulo na vertical. Esse retângulo é o tamanho da Época que será seleciona para gerar o mapeamento. Caso queira aumentar o tamanho, pressione as teclas Ctrl + E, irá alternar entre dois tamanhos.

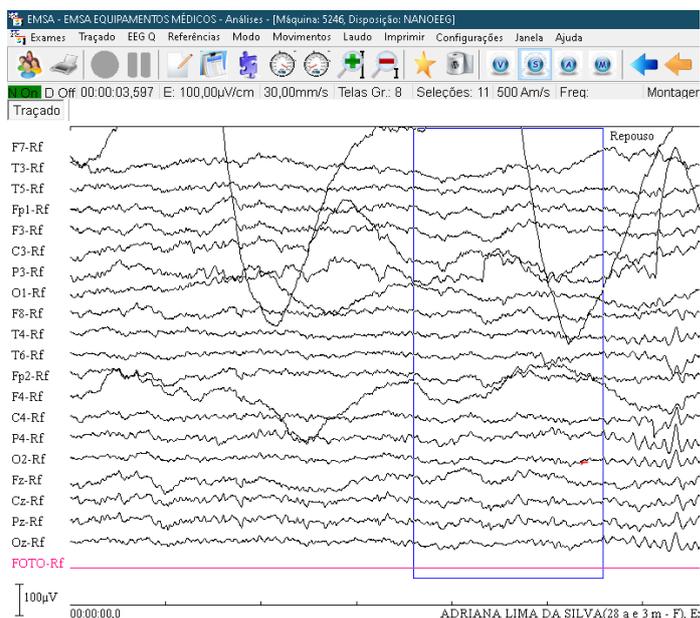


Para avançar as telas ou retroceder, pressione as teclas PGDOWN ou PGUP, ao escolher a tela que gostaria de separar o trecho para MAPA, basta clicar com o MOUSE, posicionando o retângulo no trecho desejado e apertar a tecla ENTER. Vai abrir a seguinte tela.

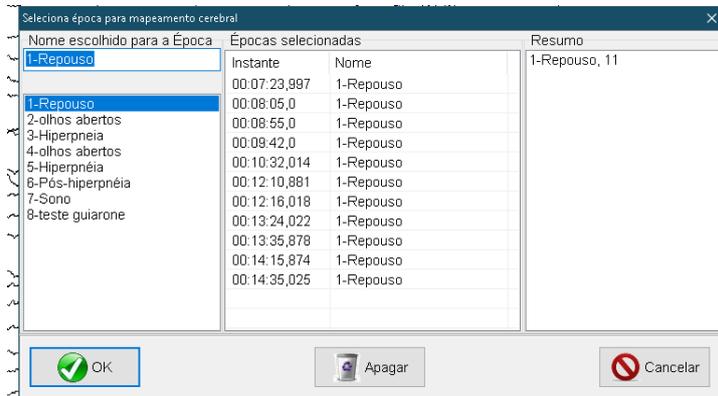


Nesta tela, seleccione do lado esquerdo o ESTADO que está a tela que escolheu, por exemplo: REPOUSO e pressione OK. Ficará em vermelho o trecho selecionado. Caso queira seleccionar mais trechos, basta seguir os passos anteriores.

Quando terminar de separar os trechos do traçado, clique no ícone 

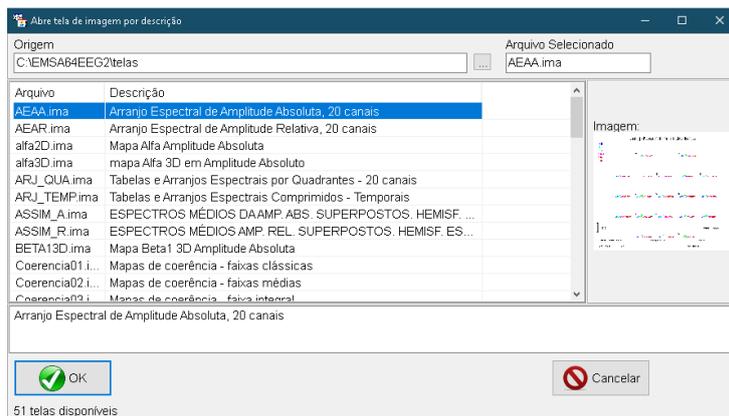

Abrira uma telas com todos os mapas existentes no programa. Basta escolher o que deseja e pressionar OK. Repetir o processo novamente caso queira mais telas de mapa.

Abas das telas abertas que foram escolhidas para mapeamento clique em cima de cada uma e pressione INSERT para salvar.

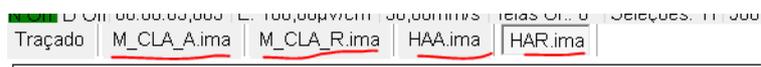

Após Salvar as telas, basta ir no MENU EXAMES, em seguida em IMPRIMIR E INSPECIONAR TELAS GRAVADAS, escolher o paciente e clicar em imprimir ou salvar em PDF.

