



Gerando o banco de dados do cadastro dos exames.

Feche todos os programas da emsa.

Abra o **GERENTE DE DADOS**, caso o programa abra uma janela solicitando para escolher a pasta numérica. (será necessário escolher a pasta onde esta o exame).

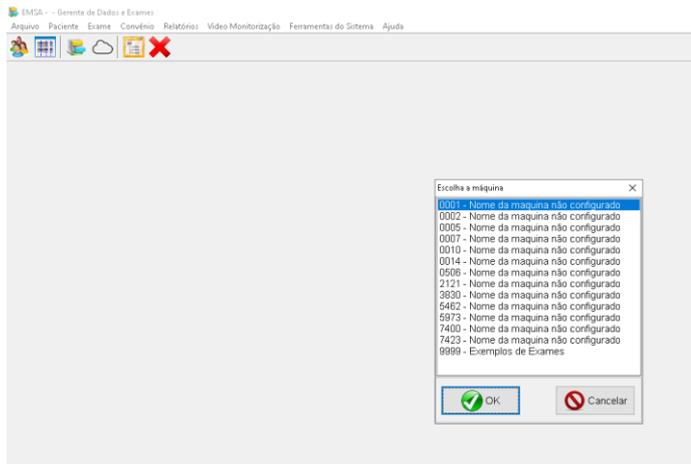

em seguida, no menu, clica em **FERRAMENTAS DO SISTEMA** e depois na opção **GERAR TXT DO PLG**.

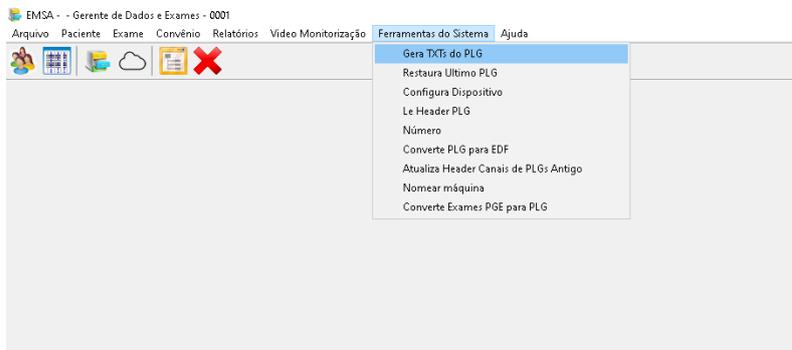

Na janela seguinte, selecione novamente a pasta numérica correspondente ao exame e clica em gerar cadastro.



Irá exibir uma msg informando que se deseja fazer o procedimento, clica em sim e aguarda a conclusão do processo. Assim que terminar, ele exibirá na tela uma msg que foi concluído.

