

Como fazer o exame de Eletroencefalograma no aparelho EEG Emsa.

Passo a passo no eeg Emsa

Depois de ter sido feita a instalação do software que será usado para realização dos exames, siga os passos abaixo:


1. Abra o programa EEG CAPTAÇÃO na sua área de trabalho

Ícone a ser clicado na sua área de trabalho



EEGCAPTAÇÕES

2. Abrirá a seguinte tela

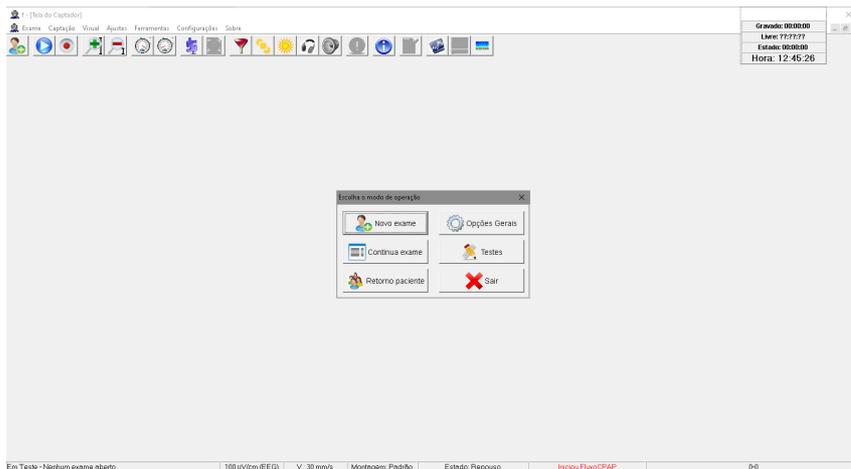

Página do software Emsa para realizar o eletroencefalograma.

2.1 Clicar em Novo exame

Dados do Paciente

Código: 26 Nome: _____ Nascimento: _____

Logradouro: _____ Complemento: _____

Bairro: _____ Cidade: _____

UF: _____ CEP: _____ Sexo: Feminino Masculino

Telefone: _____ Lateralidade: Ambas Direita Esquerda

Documento: _____ email: _____

Preencher obrigatoriamente :

- 2.1.1 Nome do paciente
- 2.1.2 Data de Nascimento
- 2.1.3 Sexo
- 2.1.4 Clicar em Ok
- 2.1.5 Peso
- 2.1.6 Altura
- 2.1.7 Clicar em Ok

3. Para iniciar aquisição aperte o icone



- Esse botão apenas habilita o traçado na tela. Não estará gravando.

4. Para Começar a gravar (clica na bolinha vermelha, esse ícone serve para iniciar e finalizar a gravação)



Para começar a gravar deve conferir as configurações, também chamadas de manobras.

Repouso
Olhos Abertos
Hiperpnéia
Pós-Hiperpnéia
Foto Estímulo
Sono Induzido
Sono Espontâneo
Audio Estimulo

Manobras do eeg

Conforme aparecem as manobras em ordem, seleciona-se por letra alfabética.

Por exemplo:

Na imagem acima aparece o primeiro como repouso, então:


1. **Repouso**, escolher para a manobra repouso a **letra A** no teclado e clicar para iniciar o exame nesta manobra.

2. **Olhos Abertos**, então para a manobra olhos fechados clica na letra **B** do teclado.

5. Após finalizado o eeg, abra o programa onde o exame irá aparecer automaticamente salvo.




O [EEG](#) EMSA vai abrir e mostrar uma lista com todos os exames que foram realizados, selecionar o nome do paciente (clicar em cima).

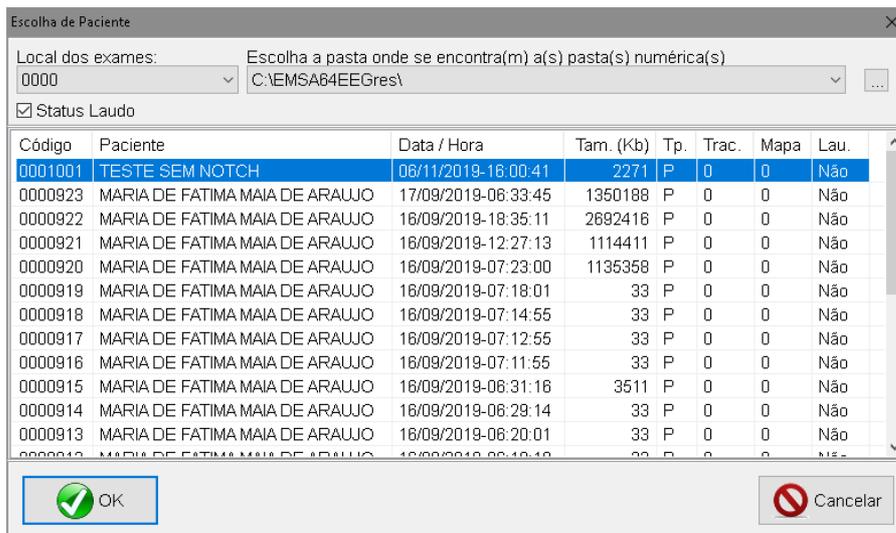



Depois clicar em OK.

6. Como salvar as imagens em pdf para enviar para ser laudado pelo neurologista.

Para Salvar todo o exame. Menu traçado > Exportar exame para PDF.

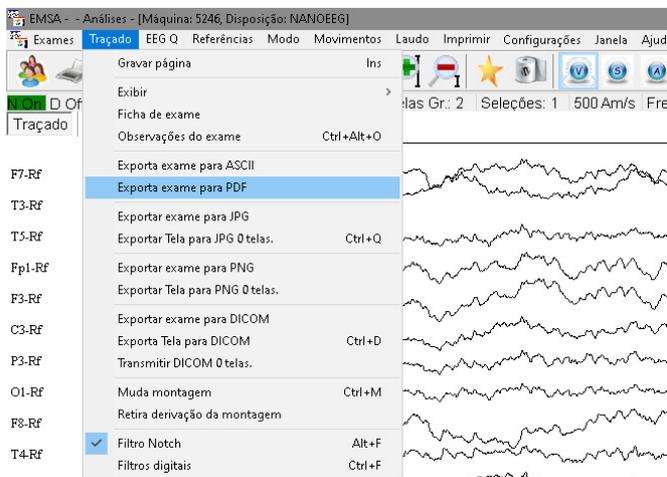

Caso queira imprimir somente algumas telas, basta ir **com BOLINHA DO MOUSE** ou as **SETAS DO TECLADO PRA CIMA E PRA BAIXO** para movimentar o traçado e assim que identificar uma tela boa, apertar a tecla **INSERT** do teclado para salvar. Após selecionadas as páginas, clicar em **EXAMES, IMPRIMIR TELAS GRAVADAS**. Irá aparecer o nome de todos os pacientes, seleciona o que desejar e clique em PDF. (Ao clicar no ícone PDF, vai aparecer uma caixa de opções de salvamento. Selecione o destino que pode ser uma pasta criada na área de trabalho para salvar o exame, colocar o nome no título do arquivo e salvar.

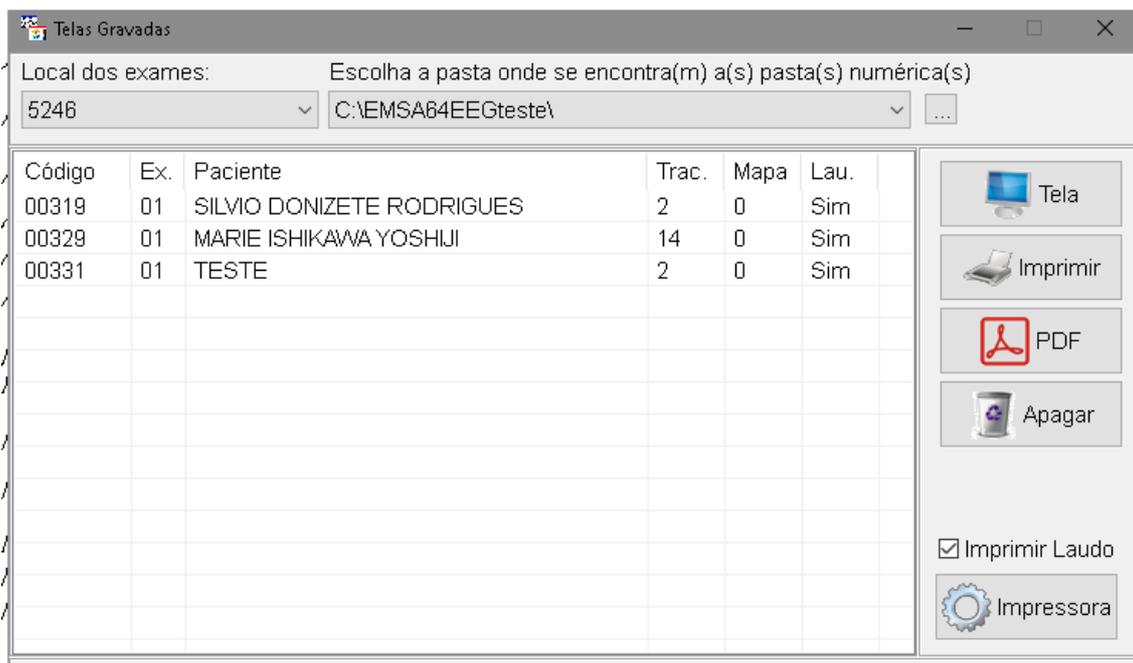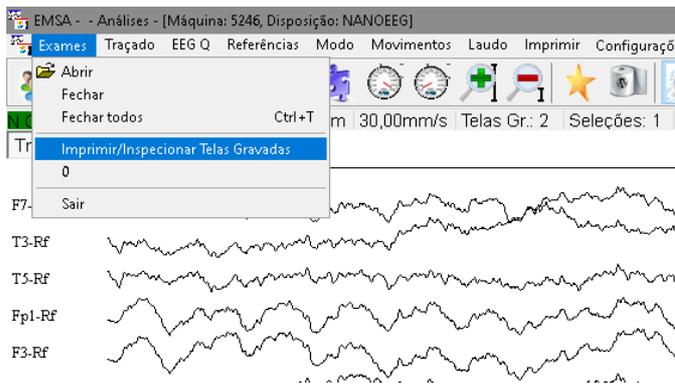

ou clique em **Imprimir** para sair na folha.