


**5. Após finalizado o eeg, abra o programa onde o exame irá aparecer automaticamente salvo.**




O [EEG](#) EMSA vai abrir e mostrar uma lista com todos os exames que foram realizados, selecionar o nome do paciente ( clicar em cima).

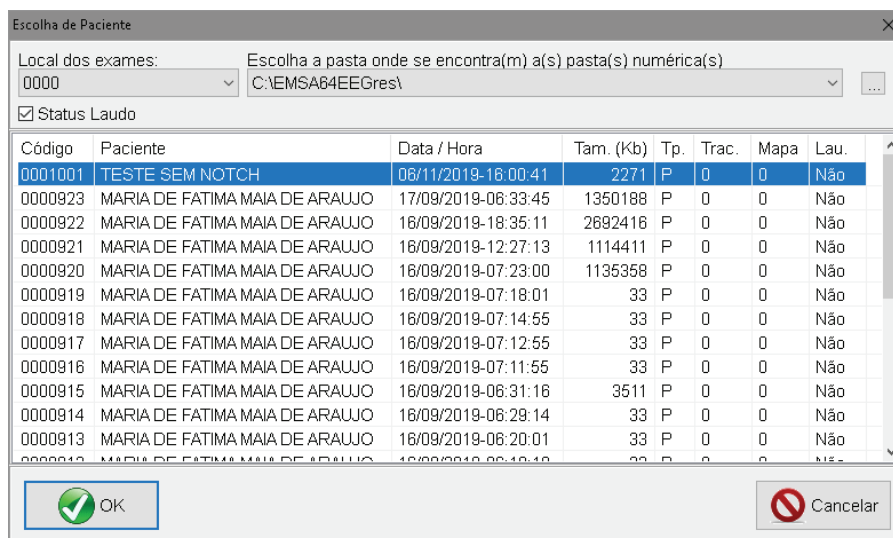



Depois clicar em OK.

**6. Como salvar as imagens em pdf para enviar para ser laudado pelo neurologista.**

Para Salvar todo o exame. Menu traçado > Exportar exame para PDF.

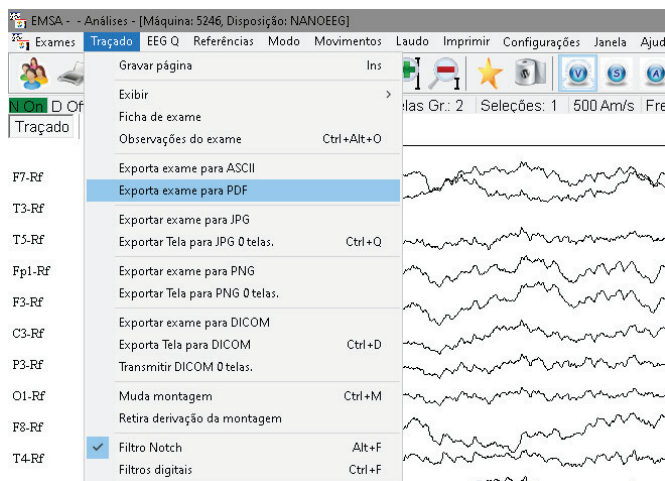

Caso queira imprimir somente algumas telas, basta ir **com BOLINHA DO MOUSE** ou as **SETAS DO TECLADO PRA CIMA E PRA BAIXO** para movimentar o traçado e assim que identificar uma tela boa, apertar a tecla **INSERT** do teclado para salvar. Após selecionadas as páginas, clicar em **EXAMES, IMPRIMIR TELAS GRAVADAS**. Irá aparecer o nome de todos os pacientes, seleciona o que desejar e clique em PDF. (Ao clicar no ícone PDF, vai aparecer uma caixa de opções de salvamento. Selecione o destino que pode ser uma pasta criada na área de trabalho para salvar o exame, colocar o nome no título do arquivo e salvar.

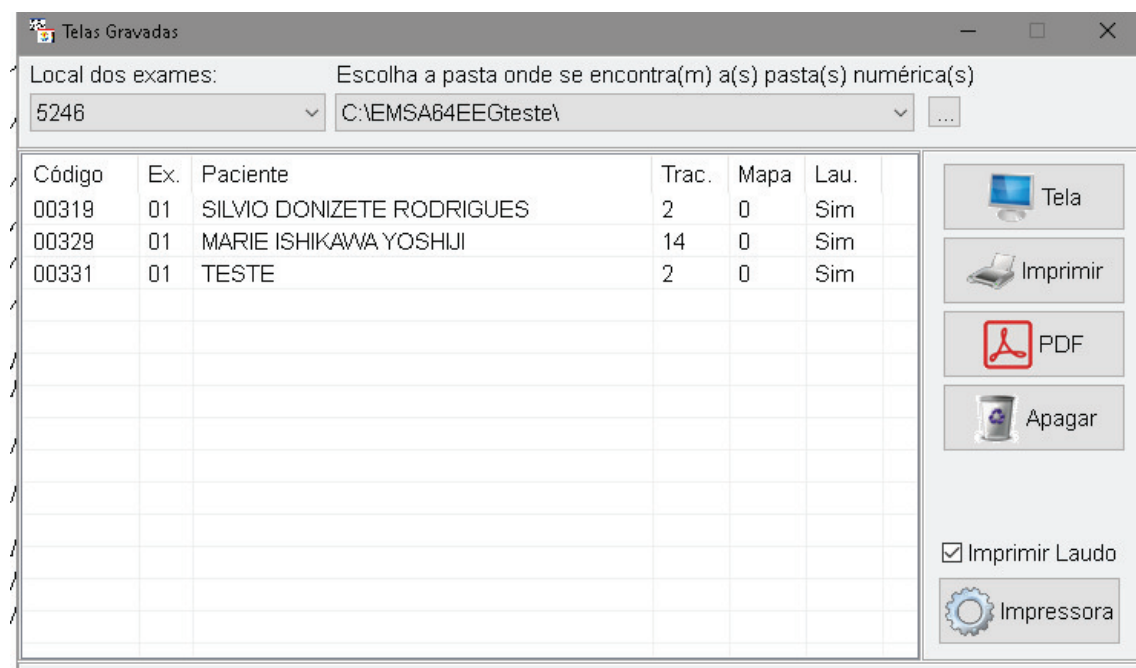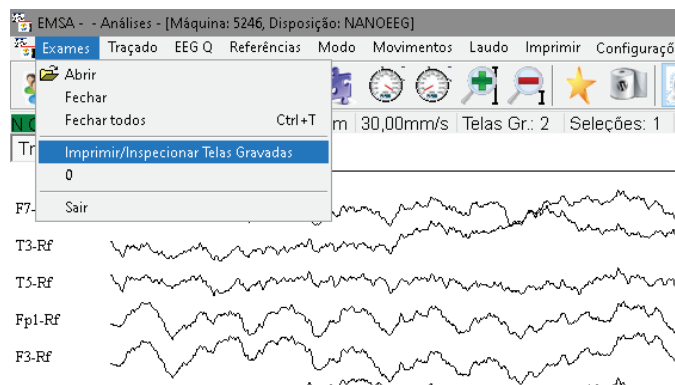

ou clique em **Imprimir** para sair na folha.